

Checklist controle CloudCuddle Junior

Doel

Deze controlelijst ondersteunt ouders, verzorgers en mantelzorgers bij de dagelijkse controle van de CloudCuddle Junior. Door de checklist volledig en zorgvuldig te doorlopen, wordt de veiligheid van de gebruiker gewaarborgd.

Belangrijk

Deze dagelijkse controle is uitsluitend van toepassing zolang de CloudCuddle Junior ongewijzigd is opgesteld en gebruikt. Bij elke wijziging in de opstelling, verplaatsing of heropbouw van het hulpmiddel dient de gebruiksaanwijzing te worden geraadpleegd en de volledige controle na opbouw, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, te worden uitgevoerd.

Wanneer een controlepunt niet aan de gestelde eisen voldoet, dient de gebruiksaanwijzing te worden geraadpleegd voor de vereiste vervolgstappen. Voor aanvullende ondersteuning kan contact worden opgenomen met CloudCuddle.

Controlepunten voor u de inliggende alleen laat in de CloudCuddle Junior

Frame

- ✓ Het frame is hard (kan met de hand niet worden ingedrukt)
- ✓ De twee buisklemmen bovenin het frame zijn gesloten
- ✓ Het ventiel is goed afgesloten
 - o Achterste ring is stevig vastgedraaid
 - o Het touwtje van de ring zit niet geklemd
 - o Rode ventieldop stevig vastgedraaid
- ✓ Geen zichtbare schade aan het frame
- ✓ Geen luchtverlies zichtbaar of hoorbaar

Hoes, gaas en laken

- ✓ Hoes is onbeschadigd
- ✓ Laken en gaas staan strak gespannen en zijn onbeschadigd
- ✓ Geen losse voorwerpen of materialen in de CloudCuddle Junior aanwezig
- ✓ Er is geen sprake van slijtage, gaten of dunne plekken in de stof

Bevestigingen en veiligheid

- ✓ De CloudCuddle Junior is op de juiste wijze aan het bed bevestigd

Ritsen en doorvoeropeningen

- ✓ Alle ritsen van de twee toegangspanelen functioneren soepel, sluiten goed en verkeren in goede staat
- ✓ Ritstrekkers van de toegangspanelen liggen plat en zijn geremd