

Checklist controle CloudCuddle Maxx

Doel

Deze controlelijst ondersteunt zorgverleners bij de dagelijkse controle van de CloudCuddle Maxx. Door de checklist volledig en zorgvuldig te doorlopen, wordt de veiligheid van de gebruiker gewaarborgd.

Belangrijk

Deze dagelijkse controle is uitsluitend van toepassing zolang de CloudCuddle Maxx ongewijzigd is opgesteld en gebruikt. Bij elke wijziging in de opstelling, verplaatsing of heropbouw van het hulpmiddel dient de gebruiksaanwijzing te worden geraadpleegd en de volledige controle na opbouw, zoals beschreven in paragraaf 6.1.1 van de gebruiksaanwijzing, te worden uitgevoerd.

Wanneer een controlepunt niet aan de gestelde eisen voldoet, dient de gebruiksaanwijzing te worden geraadpleegd voor de vereiste vervolgstappen. Voor aanvullende ondersteuning kan contact worden opgenomen met Human Protection.

Controlepunten voor u de inliggende alleen laat in de CloudCuddle Maxx

Frame

- ✓ Het frame is hard (kan met de hand niet worden ingedrukt)
- ✓ De drie buisklemmen bovenin het frame zijn gesloten
- ✓ Het ventiel is goed afgesloten
 - o Achterste ring is stevig vastgedraaid
 - o Het touwtje van de ring zit niet geklemd
 - o Rode ventieldop stevig vastgedraaid
- ✓ Geen zichtbare schade aan het frame
- ✓ Geen luchtverlies zichtbaar of hoorbaar

Hoes, gaas en laken

- ✓ Hoes is onbeschadigd
- ✓ Laken en gaas staan strak gespannen en zijn onbeschadigd
- ✓ Geen losse voorwerpen of materialen in de CloudCuddle Maxx aanwezig
- ✓ Er is geen sprake van slijtage, gaten of dunne plekken in de stof

Bevestigingen en veiligheid

- ✓ De CloudCuddle Maxx is op de juiste wijze aan het onderstel bevestigd en kan meebewegen bij gebruik van de hoog/laag functie
- ✓ Alle gespen zijn gesloten, functioneren goed en zijn onbeschadigd
- ✓ Alle spanbanden zitten stevig vast
- ✓ De toegankelijkheidsset wordt ingezet conform vastgelegde afspraken (indien van toepassing)
- ✓ Bedremmen van het bed zijn vastgezet (indien van toepassing)
- ✓ De vergrendelingsfunctie van de ligvlakverstelling is geactiveerd en de handbediening is geblokkeerd en bevindt zich niet binnen bereikbaarheid van de inliggende
- ✓ Het bed bevindt zich in de laagste positie (max 50cm) m.u.v. zorgmomenten

Ritsen en doorvoeropeningen

- ✓ Alle ritsen van de vier toegangspanelen functioneren soepel, sluiten goed en verkeren in goede staat
- ✓ De drie medische doorvoeropeningen zijn gesloten (tenzij gebruikt)
- ✓ Ritstrekkers van de drie medische doorvoeropeningen liggen plat en zijn geremd