

Checkliste CloudCuddle Junior

Ziel

Diese Checkliste unterstützt Eltern, Betreuer und pflegende Angehörige bei der täglichen Kontrolle des CloudCuddle Junior. Sie vollständig und sorgfältig durchzugehen hilft dabei, die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.

Wichtig

Diese tägliche Kontrolle gilt ausschließlich, solange das CloudCuddle Junior unverändert aufgebaut und verwendet wird. Bei jeder Änderung des Aufbaus, einer Umsetzung oder einem erneuten Aufbau des Hilfsmittels ist die Gebrauchsanweisung zu konsultieren und die vollständige Kontrolle nach dem Aufbau gemäß den Angaben in der Gebrauchsanweisung durchzuführen.

Wenn ein Kontrollpunkt die festgelegten Anforderungen nicht erfüllt, ist die Gebrauchsanweisung hinsichtlich der erforderlichen weiteren Schritte zu konsultieren. Für zusätzliche Unterstützung kann Kontakt mit CloudCuddle aufgenommen werden.

Kontrollpunkte, bevor Sie die im CloudCuddle Junior einliegende Person alleine lassen

Rahmen

- ✓ Der Rahmen ist hart aufgepumpt (d. h. er lässt sich mit der Hand nicht mehr eindrücken)
- ✓ Alle zwei Schlauchklemmen an der Oberseite sind geschlossen
- ✓ Das Ventil ist fest verschlossen
 - o Der hinterste Ring ist fest angezogen
 - o Das Bändchen des Rings ist nicht eingeklemmt
 - o Die rote Ventilkappe ist fest angezogen
- ✓ Kein sichtbarer Schaden am Rahmen
- ✓ Kein sicht- oder hörbarer Luftverlust

Matratzenbezug, Netz und Laken

- ✓ Der Matratzenbezug ist unbeschädigt
- ✓ Laken und Netz sind straff gespannt und unbeschädigt
- ✓ Keine Gegenstände oder Material im CloudCuddle Junior
- ✓ Kein Verschleiß, Risse oder dünne Flecken im Stoff

Befestigungen und Sicherheit

- ✓ Das CloudCuddle Junior ist korrekt am Bett befestigt

Zipper und Durchgangsöffnungen

- ✓ Alle Zipper der zwei Zugangspanele funktionieren reibungslos, verschließen ordnungsgemäß und befinden sich in ordnungsgemäßigem Zustand
- ✓ Die Zipper der zwei Zugangspanele liegen flach und sind verriegelt