

Checkliste CloudCuddle Maxx

Ziel

Diese Checkliste unterstützt Betreuer bei der täglichen Kontrolle des CloudCuddle Maxx. Sie vollständig und sorgfältig durchzugehen hilft dabei, die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.

Wichtig

Die tägliche Kontrolle gilt ausschließlich für den Zeitraum, in dem das CloudCuddle Maxx unverändert aufgebaut und genutzt wird. Nehmen Sie bei Änderungen im Aufbau, bei Umstellung oder Wiederaufbau des Hilfsmittels unbedingt die Bedienungsanleitung zur Hand und führen Sie nach dem in Abschnitt 6.1.1 der Anleitung beschriebenen Aufbau eine vollständige Überprüfung durch.

Sollte ein Kontrollpunkt die gestellten Anforderungen nicht erfüllen, schlagen Sie in der Bedienungsanleitung ebenfalls die sodann notwendigen Folgeschritte nach. Sofern Sie eine weitere Unterstützung benötigen, ist Human Protection gern für Sie da.

Kontrollpunkte, bevor Sie die im CloudCuddle Maxx einliegende Person alleine lassen

Rahmen

- ✓ Der Rahmen ist hart aufgepumpt (d. h. er lässt sich mit der Hand nicht mehr eindrücken)
- ✓ Alle drei Schlauchklemmen an der Oberseite sind geschlossen
- ✓ Das Ventil ist fest verschlossen
 - o Der hinterste Ring ist fest angezogen
 - o Das Bändchen des Rings ist nicht eingeklemmt
 - o Die rote Ventilkappe ist fest angezogen
- ✓ Kein sichtbarer Schaden am Rahmen
- ✓ Kein sicht- oder hörbarer Luftverlust

Matratzenbezug, Netz und Laken

- ✓ Der Matratzenbezug ist unbeschädigt
- ✓ Laken und Netz sind straff gespannt und unbeschädigt
- ✓ Keine Gegenstände oder Material im CloudCuddle Maxx
- ✓ Kein Verschleiß, Risse oder dünne Flecken im Stoff

Befestigungen und Sicherheit

- ✓ Das CloudCuddle Maxx ist korrekt am Gestell befestigt und kann sich bei Gebrauch der Hoch-/Niedrig-Funktion mitbewegen
- ✓ Alle Schnallen sind geschlossen, funktionieren ordnungsgemäß und sind unbeschädigt
- ✓ Alle Spanngurte sitzen straff
- ✓ Das Set zur Pflegeererleichterung wird gemäß den getroffenen Absprachen (sofern vorhanden) eingesetzt
- ✓ Die Bettbremsen (sofern vorhanden) des Bettes sind festgestellt
- ✓ Die Verriegelungsfunktion der Liegeflächenverstellung ist eingerastet, zudem ist die Handbedienung blockiert und befindet sich außer Reichweite der einliegenden Person
- ✓ Das Bett befindet sich in der niedrigsten Position (max. 50 cm), ausgenommen bei Momenten der Pflege

Zipper und Durchgangsöffnungen

- ✓ Alle Zipper der vier Zugangspanele funktionieren reibungslos, verschließen ordnungsgemäß und befinden sich in ordnungsgemäßigem Zustand
- ✓ Die drei medizinische Durchgangsöffnungen sind (sofern nicht in Gebrauch) geschlossen
- ✓ Die Zipper der drei medizinischen Durchgangsöffnungen liegen flach und sind verriegelt