

Tjekliste til kontrol af CloudCuddle Junior

Formål

Denne tjekliste understøtter Forældre, omsorgspersoner og pårørende i den daglige kontrol af CloudCuddle Junior. Ved nøje at gennemgå tjeklisten sikres brugerens sikkerhed.

Vigtigt

Denne daglige kontrol gælder kun, så længe CloudCuddle Junior er opstillet og anvendes uden ændringer. Ved enhver ændring af opstillingen, flytning eller genopbygning af hjælpemidlet skal brugsanvisningen konsulteres, og den fulde kontrol efter opstilling, som beskrevet i brugsanvisningen, skal udføres.

Hvis et kontrolpunkt ikke opfylder de fastsatte krav, skal brugsanvisningen konsulteres for de nødvendige næste skridt. For yderligere support kan CloudCuddle kontaktes.

Kontrolpunkter, før du lader brugeren være alene i CloudCuddle Junior.

Ramme

- ✓ Rammen er hård (kan ikke trykkes ind med hånden)
- ✓ De to rørklemmer i toppen af rammen er lukkede
- ✓ Ventilen er korrekt lukket
 - o Bagerste ring er stramt skruet fast
 - o Snoren på ringen sidder ikke i klemme
 - o Den røde ventilhætte er stramt skruet fast
- ✓ Ingen synlige skader på rammen
- ✓ Intet lufttab er synligt eller hørbart

Overtræk, net og lagen

- ✓ Overtrækket er uskadt
- ✓ Lagen og net er stramt udspændt og uskadt
- ✓ Der findes ingen løse genstande eller materialer i CloudCuddle Junior
- ✓ Der er ingen tegn på slitage, huller eller tyndslidte steder i stoffet.

Fastgørelse og sikkerhed

- ✓ CloudCuddle Junior er korrekt fastgjort til den bevægelige del af understellet og kan bevæges med ved brug af funktionen for højdejustering af sengen.

Lynlåse og gennemføringsåbninger

- ✓ Alle lynlåse på de to adgangspaneler glider let, lukker som de skal, og er i god stand
- ✓ Lynlåstrækkerne på de adgangspaneler ligger fladt og er låste