

Tjekliste til kontrol af CloudCuddle Maxx

Formål

Denne tjekliste understøtter plejepersonalet i den daglige kontrol af CloudCuddle Maxx. Ved nøje at gennemgå tjeklisten sikres brugerens sikkerhed.

Vigtigt

Denne daglige kontrol gælder udelukkende, så længe CloudCuddle Maxx er opstillet og bruges uændret. Ved enhver ændring i opstilling, flytning eller genopstilling af hjælpemidlet skal brugsanvisningen konsulteres, og den fulde procedure for kontrol efter opstilling, som beskrevet i afsnit 6.1.1 i brugsanvisningen, skal udføres.

Hvis et kontrolpunkt ikke opfylder de stillede krav, skal brugsanvisningen konsulteres for de nødvendige næste trin. Human Protection kan kontaktes for supplerende support.

Kontrolpunkter, inden den indliggende efterlades alene i CloudCuddle Maxx

Ramme

- ✓ Rammen er hård (kan ikke trykkes ind med hånden)
- ✓ De tre rørklemmer i toppen af rammen er lukkede
- ✓ Ventilen er korrekt lukket
 - o Bagerste ring er stramt skruet fast
 - o Snoren på ringen sidder ikke i klemme
 - o Den røde ventilhætte er stramt skruet fast
- ✓ Ingen synlige skader på rammen
- ✓ Intet lufttab er synligt eller hørbart

Overtræk, net og lagen

- ✓ Overtrækket er uskadt
- ✓ Lagen og net er stramt udspændt og uskadt
- ✓ Der findes ingen løse genstande eller materialer i CloudCuddle Maxx
- ✓ Der er ingen tegn på slitage, huller eller tyndslidte steder i stoffet.

Fastgørelse og sikkerhed

- ✓ CloudCuddle Maxx er korrekt fastgjort til den bevægelige del af understellet og kan bevæges med ved brug af funktionen for højdejustering af sengen.
- ✓ Alle spændeanordninger er lukkede, fungerer som de skal, og er uden skader.
- ✓ Alle spændestropper er fastgjorte
- ✓ Adgangssættet bruges i overensstemmelse med de fastlagte aftaler (hvis relevant)
- ✓ Bremserne på sengen er aktiveret (hvis relevant)
- ✓ Liggefladeindstillingens låsemekanisme er aktiveret, og den manuelle betjeningsfunktion er blokeret og er uden for den indliggendes rækkevidde
- ✓ Sengehøjden er i laveste position (maks. 50 cm), undtagen under pleje

Lynlåse og gennemføringsåbninger

- ✓ Alle lynlåse på de fire adgangspaneler glider let, lukker som de skal, og er i god stand
- ✓ De tre medicinske gennemføringsåbninger er lukkede (medmindre de er i brug)
- ✓ Lynlåstrækkerne på de tre gennemføringsåbninger ligger fladt og er låste