

Liste de contrôle du CloudCuddle Junior

Objectif

Cette liste de contrôle aide les parents, aidants et proches aidants de santé à effectuer le contrôle quotidien du CloudCuddle Junior. En suivant attentivement et intégralement la liste de contrôle, la sécurité de l'utilisateur est garantie.

Important

Ce contrôle quotidien s'applique uniquement tant que le CloudCuddle Junior est installé et utilisé sans modification. En cas de modification de l'installation, de déplacement ou de remontage du dispositif, le mode d'emploi doit être consulté et le contrôle complet après installation, tel que décrit dans le mode d'emploi, doit être effectué.

Si un point de contrôle ne répond pas aux exigences définies, le mode d'emploi doit être consulté afin de prendre les mesures correctives nécessaires. Pour toute assistance complémentaire, veuillez contacter CloudCuddle.

Points de contrôle avant de laisser l'utilisateur seul dans le CloudCuddle Junior.

Armature

- ✓ L'armature est dure et ne peut pas être enfoncée à la main
- ✓ Les deux colliers de serrage situés en haut de l'armature sont fermés
- ✓ La valve est bien fermée
 - o La bague arrière est bien serrée
 - o La cordelette de la bague n'est pas coincée
 - o Le capuchon rouge de valve est bien serré
- ✓ Aucun dommage visible sur l'armature
- ✓ Aucune perte d'air visible ou audible

Housse, maille et drap

- ✓ La housse est intacte
- ✓ Le drap et la maille sont bien tendus et intacts
- ✓ Aucun objet ou matériau lâche n'est présent dans le CloudCuddle Maxx
- ✓ Il n'y a pas d'usure, de trous ou de zones amincies dans le tissu

Fixations et sécurité

- ✓ Le CloudCuddle Junior est correctement fixé au lit.

Fermetures éclair et ouvertures de passage

- ✓ Toutes les fermetures éclair des deux panneaux d'accès fonctionnent correctement, se ferment bien et sont en bon état
- ✓ Les tirettes des fermetures éclair des panneaux d'accès sont à plat et sécurisées.