

Liste de contrôle du CloudCuddle Maxx

Objectif

Cette liste de contrôle aide les professionnels de santé à effectuer le contrôle quotidien du CloudCuddle Maxx. En suivant attentivement et intégralement la liste de contrôle, la sécurité de l'utilisateur est garantie.

Important

Ce contrôle quotidien s'applique uniquement tant que le CloudCuddle Maxx est installé et utilisé sans modification. À chaque modification de la disposition, déplacement ou remontage du dispositif, il convient de consulter le manuel et d'effectuer le contrôle complet après remontage, tel que décrit au paragraphe 6.1.1 du manuel.

Si un point de contrôle ne répond pas aux exigences fixées, il convient de consulter le manuel pour connaître les mesures à prendre. Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter Human Protection.

Points à vérifier avant de laisser le patient seul dans le CloudCuddle Maxx

Armature

- ✓ L'armature est dure et ne peut pas être enfoncée à la main
- ✓ Les trois colliers de serrage situés en haut de l'armature sont fermés
- ✓ La valve est bien fermée
 - o La bague arrière est bien serrée
 - o La cordelette de la bague n'est pas coincée
 - o Le capuchon rouge de valve est bien serré
- ✓ Aucun dommage visible sur l'armature
- ✓ Aucune perte d'air visible ou audible

Housse, maille et drap

- ✓ La housse est intacte
- ✓ Le drap et la maille sont bien tendus et intacts
- ✓ Aucun objet ou matériau lâche n'est présent dans le CloudCuddle Maxx
- ✓ Il n'y a pas d'usure, de trous ou de zones amincies dans le tissu

Fixations et sécurité

- ✓ Le CloudCuddle Maxx est correctement fixé au sommier et peut bouger lorsque vous utilisez la fonction de réglage en hauteur
- ✓ Tous les fermoirs sont fermés, fonctionnent correctement et sont intacts
- ✓ Toutes les sangles sont solidement fixées
- ✓ Le kit d'accessibilité est utilisé conformément aux accords conclus (le cas échéant)
- ✓ Les freins du lit sont verrouillés (le cas échéant)
- ✓ La fonction de verrouillage du réglage de la surface de couchage est activée et la commande manuelle est bloquée et hors de portée du patient
- ✓ Le lit est dans sa position la plus basse (max. 50 cm), sauf pendant les soins

Fermetures éclair et ouvertures de passage

- ✓ Toutes les fermetures éclair des quatre panneaux d'accès fonctionnent correctement, se ferment bien et sont en bon état
- ✓ Les trois ouvertures de passage pour dispositifs médicaux sont fermées (sauf en cas d'utilisation)
- ✓ Les tirettes des fermetures éclair des trois ouvertures de passage pour dispositifs médicaux sont à plat et freinées